

Sennheiser DW 20 Pro 1 USB

Wenn am Rechner kein Audio-Signal angezeigt wird:

- Wenn die LED *Verbindung* rot leuchtet und die LEDs *Headset* und *Akkustatus* nicht leuchten bitte das Headset in die Basisstation legen.
- Wenn die LED *Verbindung* nicht leuchtet bitte die Taste *Verbindung* drücken um eine Verbindung zwischen Headset und Basisstation herzustellen.
- Wenn kein Audio-Signal angezeigt wird und die LED *Verbindung* blau leuchtet bitte Einstellung des Audiogeräts überprüfen.

Funktion	Tasten
Headset ein/ausschalten	Taste <i>Verbindung</i> für 5s
Verbindung Headset/Basisstation herstellen/beenden	Taste <i>Verbindung</i>
Lautstärke einstellen	Taste <i>Audio</i> nach vorne/hinten
Mikrofon stummschalten	Taste <i>Audio</i> drücken
Stummschaltung aufheben	Taste <i>Audio</i> drücken

LED Verbindung	LED Headset
leuchtet blau: aktive Verbindung	leuchtet blau: Headset wird aufgeladen
leuchtet rot: keine Verbindung zum Headset	blinkt blau: aktive Verbindung
blinkt rot: Headset stummgeschaltet	blinkt rot: Akku schwach
aus: Verbindung zum Headset beendet	blinkt blau/rot: Einstellungsmodus
	aus: Headset ausgeschaltet

LED Akkustatus

4 LEDs signalisieren den Ladezustand (von links nach rechts: 0-25%, 25-50%, 50-75% und 75-100%)
 Akku fast leer: LED-Segment 1 leuchtet schwach oder blinkt



Headset


LED *Verbindung*
 LED *Akkustatus*
 LED *Headset*
 Taste *Verbindung*
 Taste *Audio*



Basisstation

Richtiges Audiogerät einstellen

Unter *Aufnahme* und *Wiedergabe* jeweils *Sennheiser DECT* auswählen und jeweils *Als Standard* drücken.

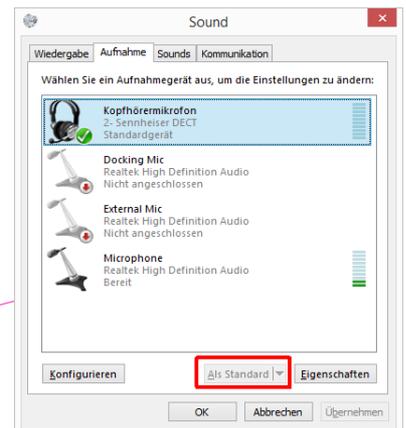

PA-Konzepte Spracherkennung

Aktivieren über  Die Spracherkennung wird deaktiviert wenn sich ein anderes Fenster öffnet.

Allgemeine Befehle

vorherige Messstelle: *zurück*
nächste Messstelle: *weiter*
Ansage aktueller Modus: *Modus*
Moduswechsel: *Modus-...*
Ansage aktuelle Position: *Position*
Positionswechsel: *Springe-...*
Pause: *Pause*
Pause verlassen: *Fortsetzen*

Moduswechsel

Modus-Null-Eins, Modus-Kombiniert, Modus-Taschentiefe, Modus-Blutung, Modus-Rezession, Modus-Plaque, Modus-Furkation, Modus-Mobilität, Modus-Vitalität

Positionswechsel

Zahnwechsel: *Springe-quadrant-zahn*
Wechsel innerhalb Zahn:
Springe-oral, Springe-vestibulär, Springe-mesial, Springe-lingual/palatinal/bukkal, Springe-distal
Wechsel Zahn und Position:
Springe-quadrant-zahn-oral/vestibulär, Springe-quadrant-zahn-mesiolingual/lingual/distolingual, Springe-quadrant-zahn-mesiopalatinal/palatinal/distopalatinal, Springe-quadrant-zahn-mesiobukkal/bukkal/distobukkal

	O1-Befund	<i>Zahn, fehlt, Brücke, Krone, Implantat, infaust</i>
	Kombiniert REZ/TST	<i>plus-fünf ... null ... fünfzehn / null, eins, zwei, drei ... fünfzehn</i>
	Taschensondierungstiefe	<i>null, eins, zwei, drei ... fünfzehn</i> Kombination aus 3 Werten (nur 0-9, ohne Pause dazwischen) möglich wenn an erster Messstelle.
	Blutung/Suppuration	<i>ja, nein, Blut, Suppuration, alle, keine, approximal</i> Kombination aus 3x <i>ja/nein</i> (ohne Pause dazwischen) möglich wenn an erster Messstelle.
	Rezession	<i>plus-fünf ... plus-eins, null, eins, ... fünfzehn, keine</i> Kombination aus 3 Werten (nur 0-9, ohne Pause dazwischen) möglich wenn an erster Messstelle.
	Plaque	<i>ja, nein, alle, keine, approximal</i> Kombination aus 3x <i>ja/nein</i> (ohne Pause dazwischen) möglich wenn an erster Messstelle vestibulär.
	Furkation	<i>null ... drei</i>
	Mobilität	<i>null ... drei</i>
	Vitalität	<i>ja, nein</i>